



clese MED *Pure*

ALKOHOLFREIE SCHNELLEDESINFEKTION



PRODUKTBESCHREIBUNG

CleseMed Pure ist ein speziell entwickeltes, aldehyd-, phenol- und alkoholfreies Kombinationsdesinfektionsmittel zur Desinfektion und Reinigung sämtlicher Oberflächen und Medizinprodukte. Es eignet sich besonders für empfindliche Kunststoffe wie Acrylglas. CleseMed Pure erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an die Arbeitssicherheit gemäß **TRGS 525/540**.

ANWENDUNGSGEBIET

CleseMed Pure Desinfektion bieten eine schnelle, gründliche und **materialschonende Reinigung**. Sie sind ideal für alkoholempfindliche Oberflächen wie Acrylglas, Plexiglas und medizinische Displays. Besonders im Dentalbereich sorgen sie für eine sichere Desinfektion von Behandlungsliegen, Instrumentenablagen und Arbeitsflächen - ohne empfindliche Materialien zu beschädigen. Effektiv, schonend & vielseitig einsetzbar. Vor Gebrauch die Fläche reinigen.

ANWENDUNGSHINWEISE

- ▶ Tragen Sie immer die geeigneten Schutzhandschuhe sowie Augen- und Mundschutz
- ▶ Verwenden Sie bei Bedarf zusätzliche Schutzkleidung
- ▶ Halten Sie ungeschützte Personen vom Anwendungsbereich fern
- ▶ Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während der Anwendung
- ▶ Vermeiden Sie jeden direkten Kontakt mit den Augen
- ▶ Atmen Sie keine Aerosole oder Dämpfe ein
- ▶ Halten Sie das Produkt von Zündquellen fern

Vor dem Gebrauch bitte die komplette Produktinformation lesen. Desinfektionsmittel und Biozide müssen immer bestimmungsgemäß und sicher angewendet werden.

Wichtig: Gemäß EU-Verordnung MDR 745/2017 müssen Sie „schwerwiegende Vorfälle“ dem Hersteller (Kleiser Medical) und den zuständigen Behörden melden. Informieren Sie sich über die korrekte Funktionsweise, mögliche Risiken und vorbeugende Maßnahmen, um die Produktsicherheit zu gewährleisten.

PRODUKTSORTIMENT UND SPEZIFIKATION

Artikelnummer	Größe	Art	Verpackungseinheit
202362	140 Tücher 30 x 20 cm	Nachfüllbeutel	12 Beutel / Karton
201620	10 L	Kanister	1 Stück



clese MED *Pure*

ALKOHOLFREIE SCHNELLEDESINFEKTION



ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g der gebrauchsfertigen Tränklösung sind enthalten:

1,25 g H₂O₂
Hilfsstoffe

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- ▶ Kühl lagern, Erhitzen führt zu Druckerhöhungen und Berstgefahr.
- ▶ Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- ▶ Vor Feuer schützen.

KENNZEICHNUNG

BAuA-Nr.: N-50763

INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT



Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.kleiser-dental.de

Spezielle Anfragen richten Sie bitte an service@kleiser-medical.de

EINWIRKZEITEN UND WIRKSPEKTRUM

CleseMed Pure	Belastung		Norm	Einwirkzeit
	hoch	niedr.		
BAKTERIZID & LEVUROZID: MRSA, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, C. albicans, E. coli, P. mirabilis		X	DIN EN 16615 (2015) DIN EN 13624 DIN EN 13727	1 Min.
begrenzt Viruzid plus behüllte Viren BVDV Vaccinia Stamm Elstree		X	DIN EN 14476 DIN EN 16777	5 Min.
unbehüllte Viren Adenovirus Typ 5 Murine Norovirus		X	DIN EN 14476 DIN EN 16777	1 Min.



Kleiser Medical GmbH
Weidenstraße 1
88605 Sauldorf

Telefon +49 (0) 7575 925040
Freifax +49 (0) 800 2352329

service@kleiser-medical.de
www.kleiser-medical.de